

Höhenstr. 101
A-6020 Innsbruck | Austria
office@bucinator.at
+436769644000
www.bucinator.at



Klettverschluss

1. Sicherheitshinweise

1.1 Zu beachten

Vor Inbetriebnahme und Gebrauch von Bucinator muss diese Anleitung komplett gelesen werden. Sie ist zur späteren Wiederverwendung aufzubewahren. Bei Produkt-, Sach- oder Personenschäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

Hinweise für das Pflegepersonal



- Das Bucinator System darf weder als Sicherheits- noch als Medizinprodukt deklariert werden.
- Das Bucinator System dient lediglich der Unterstützung des Pflegepersonals, ersetzt dieses jedoch nicht.
- Vor jedem Einsatz ist das Bucinator System auf seine Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.

2. Produktbeschreibung

2.1 Anwendungsbereiche

Das Bucinator System wurde vorwiegend für den Einsatz in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern sowie für betreutes Wohnen und die Angehörigenpflege konzipiert. Die dort notwendige Pflege und Beaufsichtigung von demen- und sturzgefährdeten Bewohnern stellt für alle beteiligten Personen einen erhöhten Pflegeaufwand dar. Hier bietet das Bucinator-System die notwendige Unterstützung und minimiert das Sturzrisiko sowie die Gefahr des Weglaufens erheblich.

Hinweis



Klemme offen (Aus), Klemme geschlossen (Ein)
Pad immer mit geöffneter Klemme lagern (Aus)

3. Aufbau und Funktion

1. Pad seitlich am Rand unter die Matratze legen
2. Empfänger an Rufanlage anstecken
3. System testen: Blinkt die rote LED (im O von Bucinator) noch ca. 3 Sekunden nach der Entlastung des Pads, wechseln Sie bitte die Batterie.

3.1 Funkempfänger

An die Rufanlage anstecken und Funktion überprüfen (wird ein Ruf ausgelöst?)

I/O Taster:

-kurzes Drücken aktiviert Stummschaltung für 15min (LED blinkt grün)
-durch erneutes kurzes Drücken wird das System wieder aktiv ((LED blinkt nicht mehr grün



-Bei Schrack Rufanlagen „Quit“ Taster zur Quittierung eines Rufes verwenden

3.2 Reinigung/Desinfektion

Das System kann mit allen handelsüblichen Desinfektions- und Reinigungsmitteln, max. 70 Vol% Alkohol gereinigt werden.

Verwenden Sie keine ätzenden Mittel.

3.3 Fehler Management

Sollte es notwendig sein, dass System neu zu kalibrieren, muss das Druckentlastungsventil im Batteriefach kurz gedrückt werden. Hierbei darf das Pad weder belastet noch gefaltet sein.



3.4 Batterie Management

Die rote LED (im O von Bucinator) wird durch das Auslösen eines Funksignals an den Empfänger aktiviert. Blinkt Diese noch ca. 3 Sekunden nach dem Auslösen eines Rufes, wechseln Sie bitte die Batterie. Je nach Benutzung hält die Knopfzelle bis zu einem Jahr.



- Öffnen Sie den Klettverschluss und ziehen das Gehäuse aus der Hülle. Dann öffnen Sie das Batteriefach auf der Hinterseite des Senders.
- Entnehmen Sie ggf. die alte Batterie
- Setzen Sie die neue Batterie ein
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2032. Achten Sie auf die richtige Polung!
- Verschließen des Batteriefach und Überprüfung des Systems (Probe)

Achtung! Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
Leere Batterien sind Sondermüll und gehören nicht in den Hausmüll!